



CEANCOR
LABORATORIES



MASCARILLA CLÍNICA **MODELO KN95**

MASCARILLA CLÍNICA MODELO KN95, desechables, sanitarias y de uso práctico. Fabricadas con material de alta calidad, seguro, suave y cómodo.

Brinda protección sobre un 95% de partículas aerotransportadas y contaminación (bacterias, polvo, virus, etc.). Recomendada para uso diario, oficina, laboratorios y actividades al aire libre.

Cuenta con correas elásticas y clip de nariz ajustable para diferentes formas y tamaños de cara.

- Antivirus de transmisión
- Antigotas de transmisión
- Eficaz contra la contaminación
- Antipolvo
- Antibacterianas
- Antipartículas finas - PM2,5
- Material: Tela de alta calidad, no tejida
- Sistema anti niebla, que evita el empañe de lente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de protección:

KN95

Material:

Tela no tejida

Tasa de filtrado:

≥ 95%


Capas de filtrado:

5 capas



CEANCOR
LABORATORIES

MODO DE USO

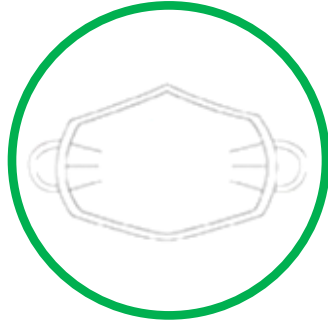

1. Desdobra la máscara, con la pinza nasal que mira hacia adelante sobre la máscarilla.



2. Después de cubrirse la barbilla, ajuste las bandas elásticas en las orejas.



3. presione con ambas manos la pinza nasal, para lograr un ajuste adecuado de la máscarilla



4. Cubra la máscara con ambas manos e inhale rápidamente para verificar la estanqueidad.



CEANCOR
LABORATORIES



MASCARILLA CLÍNICA

MODELO KN95

5 - CAPAS Filtro de protección

